



Ходунок ролятор:  
OSD-KQ-1010  
Інструкція

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.  
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.  
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.  
Ходунок ролятор «OSD-KQ-1010» (далі за паспортом — виріб / ролер) — рекомендовано для застосування у медичних закладах та вдома.  
Виріб розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача. Відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.



Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будь-які характеристики, зазначені у цій Інструкції. Усі дані, зазначені в Інструкції, наведені для ознайомлення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
2. **ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** у випадку зносу або пошкодження.
3. **ЯКЩО ВІЯВЛЕНО** несправність, то **НЕ ПРОВODЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
4. **БУДЬТЕ ОБАЧНІ** на нерівних поверхнях.
5. **НІКОЛИ** не сидіть на ролері, штовхаючи себе уперед ногами.
6. **ГАЛЬМА** повинні бути у «паркувальному» положенні, коли ролер використовується як сидіння.
7. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб на сходах та ескалаторах.
8. **МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ** на виріб – 100 кг. **НІКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
9. **У ВИПАДКУ** використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.



Використовуйте ролер тільки у якості опори для рук під час пересування. Не використовуйте виріб, як інвалідний візок. Максимальне навантаження – 100 кг. Не перевищуйте цей ліміт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Різновид:	на колесах
Конструкція:	складана
Матеріал рами:	алюміній
Матеріал руків'я:	пластмаса
Загальна ширина, (см):	54
Загальна глибина, (см):	66
Загальна висота, (см):	83,5 - 94,5
Сидіння, Ш x Г, (см):	39 x 29
Розмір коліс, (дюйми):	7"
Максимальне навантаження, (кг):	100
Гарантія, (міс.):	12

ВИКОРИСТАННЯ

Розкладання

1. Розкладіть раму.
2. Відрегулюйте бажану для користувача висоту за допомогою ручок.
3. Перевірте «ходові якості» ролера.

Гальма

Важливо, щоб гальма були у «паркувальному» положенні. Для гальмування потягніть руків'я догори.

Регулювання висоти ручок

Для регулювання висоти ручок потрібно перемістити кнопкові фіксатори та встановити їх на відповідній висоті. Опора ніколи не повинна бути вище, ніж зазначено на трубках з рельєфними насічками. Ручки потрібно розташувати на висоті зап'ястя. Затягувати стопорні важелі треба таким чином, щоби вони були направлені донизу. Для того, щоб повернути важіль, треба спочатку потягнути його назовні.



Перевіряйте гальмівний механізм опісля урегулювання висоти руків'я. Переконайтеся, що всі кріплення надійно затягнуті та зафіксовані.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, заареєстрованими та дозволенними в Україні для дезінфекції поверхонь за режими, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

**ПРИМІТКА:** Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених в Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонт виробу);
  - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
  - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.**

Дата продажу: \_\_\_\_\_ Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «OSD-KQ-1010» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.



**Виробник:** Wuxi Kangqiang Industrial Equipment Co., Ltd / Вуксі Кангквіанг Індастріал Еквіпмент Ко., Лтд.

Dapu Industrial Zone, Yixing City, Jiangsu Province, China /Дану Індустріал Зоне, Ііхінг Ціті, Йіангсу Провінце, Китай.

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2 .

**Номер редакції:** № 2 від 26.05.2023.

**Термін придатності виробу:** див. на маркуванні.

**Гарантійний термін на виріб «OSD-KQ-1010»:** 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених в Інструкції.

