



Ходунок ролятор

OSD-LW-ROL1

Інструкція

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтеся вносити зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Ролер «OSD-LW-ROL1» (далі за паспортом — виріб / обладнання) — рекомендовано для застосування у медичних закладах та вдома. Виріб розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.



Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будь-які характеристики, зазначені у цій Інструкції. Усі дані, зазначені в Інструкції, наведені для ознайомлення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** у випадку зносу або пошкодження.
- ЯКЩО ВІЯВЛЕНО** несправність, то **НЕ ПРОВОДЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
- БУДЬТЕ ОБАЧНІ** на нерівних поверхнях.
- НИКОЛИ** не сидіть на ролері, штовхаючи себе уперед ногами.
- ГАЛЬМА ПОВИННІ** бути у «паркувальному» положенні, коли ролер використовується як сидіння.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб на сходах та ескалаторах.
- МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ** на виріб – 130 кг. **НИКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
- У ВИПАДКУ** використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.



Використовуйте ролер тільки як опору для рук під час пересування. Не використовуйте виріб, як інвалідний візок. Максимальне навантаження – 130 кг. Не перевищуйте цей ліміт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Значення |
|-----------------------------------|------------|
| Різновид: | на колесах |
| Конструкція: | складана |
| Матеріал рами: | сталь |
| Матеріал руків'я: | пластмаса |
| Ширина, (см): | 59 |
| Висота ручок, (см): | 80 - 100 |
| Висота сидіння від підлоги, (см): | 58 |
| Розмір коліс, (дюйми): | 8 |
| Вага виробу, (кг): | 10,8 |
| Максимальне навантаження, (кг): | 130 |
| Гарантія, (міс.): | 12 |

ВИКОРИСТАННЯ

Розкладання

- Розкладіть раму.
- Відрегулюйте бажану для користувача висоту за допомогою ручок.
- Перевірте «ходові якості» ролера.

Гальма

Важливо, щоб гальма були в «паркувальному» положенні. Для гальмування потягніть руків'я догори.

Регулювання висоти ручок

Для регулювання висоти ручок потрібно послабити фіксувальні важелі та встановити опору на потрібну висоту. Опора ніколи не повинна бути вище ніж зазначено на трубках з рельєфними насічками. Ручки мають бути розташовані на рівні зап'ястя. Затягувати стопорні важелі треба таким чином, щоб вони були спрямовані донизу. Щоб повернути важіль, треба спочатку потягнути його назовні.



Після регулювання висоти ручок обов'язково перевірте гальмівний механізм. Переконайтеся, що всі кріплення надійно затягнуті та зафіксовані.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволенними в Україні для дезінфекції поверхонь відповідно до режимів, регламентованих чинними нормативними документами щодо застосування дезінфікуючих засобів.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та мийних засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



Перевіряйте справність виробу перед кожним використанням. Якщо обладнання використовується нерегулярно, оглядайте його щонайменше раз на рік. У разі виявлення поломки, несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених в Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонт виробу);
 - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
 - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «OSD-LW-ROL1» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.



Виробник: Mingguang Longway Medical Technology Co., Ltd., № 59, Lingji Road, Industrial Park, Mingguang City, Chuzhou City, Anhui Province, China / Мінггуанг Лонгвей Медікал Технолоджи Ко., Лтд., №59, Лінгджи Род, Індастріал Парк, Мінггуанг Сіті, Чужоу Сіті, Анхуї Провінс, Китай
Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ "ОСД Східна Європа". Адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2.
Тел.: +38 (044) 232-44-51, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: № 2 від 15.01.2026.

Термін придатності виробу: див. на маркованні.

Гарантійний термін на виріб «OSD-LW-ROL1» — 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених в Інструкції.

