



Ролер: **OSD-RB-91040RW**

## Інструкція

### ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.  
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.  
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Ролер «OSD-RB-91040RW» (далі за паспортом – виріб / обладнання) – рекомендовано для застосування у медичних закладах та вдома.

Розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** його у випадку зносу або пошкодження.
- ЯКЩО ВИЯВЛЕНО** несправність, то **НЕ ПРОВODЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
- БУДЬТЕ ОБАЧНІ** на нерівних поверхнях.
- НІКОЛИ** не сидіть на ролері, штовхаючи себе вперед ногами.
- ГАЛЬМА ПОВИННІ** бути у «паркувальному» положенні, коли ролер використовується як сидіння.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб на сходах та ескалаторах.
- МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ** на виріб – 136 кг. **НІКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
- У ВИПАДКУ** використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Модель:	OSD-RB-91040RW
Матеріал:	сталь
Ширина, (см):	57
Висота ручок, (см):	79 – 95
Висота сидіння від підлоги, (см):	58
Діаметр коліс, (дюйми):	8"

Вага, (кг):	10,8
Максимальне навантаження, (кг):	136

### ВИКОРИСТАННЯ

#### Розкладання

- Розкладіть раму.
- Установіть кошик та лоток.
- Відкрийте ролер у робоче положення. Установіть важіль блокування за допомогою гвинта. Важіль фіксації з шайбою повинен бути встановлений на зовнішньому боці.
- Вставте рукоятку трубки у бік стійки та затягніть фіксуючі важелі.
- Вони повинні бути спрямовані донизу під час використання.
- Опустіть важільний замок, що розташований праворуч під сидінням, донизу.
- Зніміть запобіжну заціпку.
- Підійміть поперечну балку під сидінням догори.
- Відрегулюйте бажану для користувача висоту за допомогою ручок.
- Перевірте «ходові якості» ролера.

#### Гальма

Важливо, щоб гальма були у «паркувальному» положенні. Для гальмування потягніть руків'я догори.

#### Регулювання висоти ручок

Для регулювання висоти ручок потрібно відкрити фіксуючі важелі та відрегулювати опертя на відповідній висоті. Опора ніколи не повинна бути вище, ніж зазначено на трубках з рельєфними насічками. Ручки потрібно розташувати на висоті зап'ястя. Затягувати стопорні важелі треба таким чином, щоб вони були направлені донизу. Для того, щоб повернути важіль, треба спочатку потягнути його назовні.



**Перевіряйте гальмівний механізм опісля урегулювання висоти руків'я. Переконайтеся, що всі кріплення надійно затягнуті та зафіксовані.**

### ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволенними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

**ПРИМІТКА:** Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



**Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкодження або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.**

### УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонт виробу);
  - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
  - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.**

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_

### ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Ролер «OSD-RB-91040RW» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

**Виробник:** Mingguang Longway Medical Technology Co., Ltd. / Мінггуанг Лонгвей Медікал Текнолоджі Ко., Лтд.

№ 59, Lingji Road, Industrial Park, Mingguang City, Chuzhou City, Anhui Province, China / No.59, Лінгджи Роад, Індастріал Парк, Мінггуанг Сіті, Чужоу Сіті, Анхуї Провінс, Китай.

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

**Номер редакції:** № 3 від 04.03.2019.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

Гарантійний термін на **ролер «OSD-RB-91040RW»** – 1 рік з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.

