



Ролер: OSD-ROL

Інструкція

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.

Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Ролер «OSD-ROL» (далі за паспортом – виріб / обладнання) – рекомендовано для застосування у медичних закладах та вдома.

Розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** його у випадку зносу або пошкодження.
- ЯКЩО ВІЯВЛЕНО** несправність, то **НЕ ПРОВІДЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
- БУДЬТЕ ОБАЧНІ** на нерівних поверхнях.
- НІКОЛИ** не сидіть на ролері, штовхаючи себе вперед ногами.
- ГАЛЬМА ПОВИННІ** бути у «паркувальному» положенні, коли ролер використовується як сидіння.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб на сходах та ескалаторах.
- МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ** на виріб – 136 кг. **НІКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
- У ВИПАДКУ** використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Модель:	OSD-ROL
Матеріал:	сталь
Колір рами:	синій
Ширина сидіння, (см):	38
Загальна ширина, (см):	54
Висота ручок, (см):	80 – 100
Висота сидіння від підлоги, (см):	60
Діаметр коліс, (дюйми):	8"

Вага, (кг):	10,8
Максимальне навантаження, (кг):	136

ВИКОРИСТАННЯ

Розкладання

- Розкладіть раму.
- Установіть кошик та лоток.
- Відкрийте ролер у робочому положенні. Установіть важіль блокування за допомогою гвинта. Важіль фіксації з шайбою повинен бути встановлений на зовнішньому боці.
- Вставте рукоятку трубки у бік стійки та затягніть фіксуючі важелі.
- Вони повинні бути спрямовані донизу під час використання.
- Опустіть важільний замок, що розташований праворуч під сидінням, донизу.
- Зніміть запобіжну защіпку.
- Підійміть поперечну балку під сидінням догори.
- Відрегулюйте бажану для користувача висоту за допомогою ручок.
- Перевірте «ходові якості» ролера.

Гальма

Важливо, щоб гальма були у «паркувальному» положенні. Для гальмування потягніть руків'я догори.

Регулювання висоти ручок

Для регулювання висоти ручок потрібно відкрити фіксуючі важелі та відрегулювати опертя на відповідній висоті. Опора ніколи не повинна бути вище, ніж зазначено на трубках з рельєфними насічками. Ручки потрібно розташувати на висоті зап'ястя. Затягувати стопорні важелі треба таким чином, щоби вони були направлені донизу. Для того, щоб повернути важіль, треба спочатку потягнути його назовні.



Перевіряйте гальмівний механізм опісля урегулювання висоти руків'я. Переконайтеся, що всі кріплення надійно затягнуті та зафіксовані.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволенними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкодження або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонт виробу);
 - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
 - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Ролер «OSD-ROL» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

Виробник: Jiaxing Xinyi Medical Instrument Co., Ltd / Цзясін Сіньюй Медікал Інструмент Ко., Лтд.

No. 100, Zhijiang Road, Economic Development Zone, Jiashan City, Zhejiang Province, China / №100, Чжецзян Родд, Економік Девелопмент Зон, Іашан Сіті, Чженцзян Провінс, Китай.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 4 від 04.11.2019.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін на **ролер «OSD-ROL»** – 1 рік з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.

