



## Палиця-квадропод зі зменшеною базою

**OSD-BL550101**

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.  
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС

## ЗМІСТ

|  |   |
|--|---|
| 1. Вступ.....                            | 3 |
| 2. Заходи безпеки.....                   | 3 |
| 3. Технічні характеристики.....          | 4 |
| 4. Використання .....                    | 4 |
| 5. Технічне обслуговування і догляд..... | 4 |
| 6. Умови гарантії .....                  | 5 |

## 1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь-ласка уважно ознайомтесь з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання виробу.



**УВАГА**

**Не використовуйте палицю не ознайомившись з інструкцією.**

**Не використовуйте палицю у випадку її пошкодження.**

**Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Палиця-квадропод «OSD-BL550101» – рекомендована для застосування літнім та слабким людям, а також людям з обмеженими функціональними можливостями нижніх кінцівок. Використовується для полегшення самостійного пересування інвалідів, літніх людей, хворих у реабілітаційний період після травм та операцій.

Палиці «OSD» розроблені для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

## 2. Заходи безпеки

1. Перед початком використання палиці або під час використання після тривалого зберігання **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що всі частини закріплені та міцно зафіксовані.
2. Регулярно **ПЕРЕВІРЯЙТЕ** загальний технічний стан палиці, адже усі елементи з часом зношуються. Особливо це стосується наконечника, тому стежте за його станом та вчасно **ЗАМІНЮЙТЕ**.
3. Якщо виявлено несправність, то **НЕ ПРОВОДЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
4. Будьте обачні на слизькій дорозі. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** палицю як інструмент для спуску або засіб для самозахисту.



**УВАГА**

**Не використовуйте ручку палиці в якості підставки для ніг або опертя для сидіння.**

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування палиці, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

### 3. Технічні характеристики

| Параметр                        | Значення                 |
|---------------------------------|--------------------------|
| Модель:                         | OSD-BL550101             |
| Тип:                            | для правої та лівої руки |
| Загальна висота, (см):          | від 72,5 до 95,4         |
| Максимальне навантаження, (кг): | 90                       |
| Вага, (кг):                     | 0,68                     |

### 4. Використання

#### Налаштування висоти палиці

Для того, щоб налаштувати правильну довжину потрібно поставити палицю біля себе на відстані 20 см. Потім трохи вигнути лікті й у цьому стані вибрати зручну довжину.

#### Регулювання висоти

Для того, щоб відрегулювати необхідну висоту палиці потрібно взяти верхню частину, натиснути на регулятор і розтягнути її.



**Використовуйте наконечники для запобігання пошкоджень.**

### 5. Технічне обслуговування і догляд



**Перевіряйте справність палиці перед кожним використанням, якщо палиця використовується не регулярно, то оглядайте її мінімум раз на шість місяців. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, не використовуйте виріб.**

#### Догляд

Чистити палицю необхідно тільки сухою та м'якою ганчіркою.

#### Зберігання

Палицю потрібно зберігати у сухому місці.



## 6. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
  - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:  
*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.**

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_