



**Тростина регульована:  
OSD-C01**

## ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.  
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.  
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Тростина «OSD-C01» (далі за паспортом – виріб / обладнання) – розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** його у випадку зносу або пошкодження.
- ЯКЩО ВИЯВЛЕНО** несправність, то **НЕ ПРОВОДЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
- ВЧАСНО** замінійте наконечник!
- БУДЬТЕ ОБАЧНІ** на нерівних поверхнях.
- БУДЬТЕ ОБАЧНІ** на слизькій дорозі. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб, як інструмент для спуску або засіб для самозахисту.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** ручку виробу в якості підставки для ніг або опертя для сидіння.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр  | Значення                 |
|-----------|--------------------------|
| Модель:   | OSD-C01                  |
| Тип:      | для правої та лівої руки |
| Матеріал: | алюміній                 |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Матеріал руків'я:               | пластмаса      |
| Колір:                          | бронза         |
| Загальна висота, (см):          | від 103 до 133 |
| Діаметр, (см):                  | 1,9            |
| Максимальне навантаження, (кг): | 113            |

## ВИКОРИСТАННЯ

### Налаштування висоти палиці

Для того, щоб налаштувати правильну довжину потрібно поставити виріб біля себе на відстані 20-ти см. Потім трохи вигнути лікті й у цьому стані вибрати зручну довжину.

### Регулювання висоти

Для того, щоб відрегулювати необхідну висоту виробу потрібно узяти верхню частину, натиснути на регулятор і розтягнути його.



**Використовуйте наконечники для запобігання пошкодженню.**

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою та м'якою ганчіркою після кожного використання. Виріб потрібно зберігати у сухому місці.

**ПРИМІТКА:** Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



**Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкодження або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.**

## УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
  - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром. УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.*

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_

## ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

**Виріб «OSD-C01»** відповідає технічним вимогам і визнано придатним для експлуатації.

**Виробник:** Combo (Zhongshan) Medical Equipment Co.,Ltd. / Комбо (Жонгшан) Медікал Еквіпмент Ко., Лтд.  
NO.6 Tongxing East Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, 528414, China / Білдінг 1, № 6, Еаст Тонгксінг Род, Донгшен Товн, Жонгшан Сіті, Гуандонг Провінсе, 528414, Китай  
**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський, 100/2.  
Тел.: +38 (044) 232-44-51, e-mail: office@osd.com.ua  
**Номер редакції:** № 2 від 14.10.2024.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

**Термін придатності виробу:** див. на маркованні.

**Гарантійний термін на виріб «OSD-C01»** – 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

