



Палиця складна з пластмасовою ручкою Т-форми

OSD-RPM-76080

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС

ЗМІСТ

1. Вступ.....	3
2. Заходи безпеки.....	3
3. Технічні характеристики.....	4
4. Використання	4
5. Технічне обслуговування і догляд.....	4
6. Умови гарантії	5

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь-ласка уважно ознайомтесь з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання виробу.



Не використовуйте палицю не ознайомившись з інструкцією.

Не використовуйте палицю у випадку її пошкодження.

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Палиця складна «OSD-RPM-76080» – рекомендована для застосування літнім та слабким людям, а також людям з обмеженими функціональними можливостями нижніх кінцівок. Використовується для полегшення самостійного пересування інвалідів, літніх людей, хворих у реабілітаційний період після травм та операцій.

Палиці «OSD» розроблені для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

2. Заходи безпеки

1. Перед початком використання палиці або під час використання після тривалого зберігання **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що всі частини закріплені та міцно зафіксовані.
2. Регулярно **ПЕРЕВІРЯЙТЕ** загальний технічний стан палиці, адже усі елементи з часом зношуються. Особливо це стосується наконечника, тому стежте за його станом та вчасно **ЗАМІНЮЙТЕ**.
3. Якщо виявлено несправність, то **НЕ ПРОВОДЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
4. Будьте обачні на слизькій дорозі. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** палицю як інструмент для спуску або засіб для самозахисту.



Не використовуйте ручку палиці в якості підставки для ніг або опертя для сидіння.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування палиці, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-RPM-76080
Тип:	для правої та лівої руки
Загальна висота, (см):	від 84 до 94
Розмір у складеному вигляді, (см):	29 x 16
Максимальне навантаження, (кг):	100

4. Використання

Налаштування висоти палиці

Для того, щоб налаштувати правильну довжину потрібно поставити палицю біля себе на відстані 20 см. Потім трохи вигнути лікті й у цьому стані вибрати зручну довжину.

Регулювання висоти

Для того, щоб відрегулювати необхідну висоту палиці потрібно взяти верхню частину, натиснути на регулятор і розтягнути її.

Складання

Щоб скласти модель OSD-RPM-76080 потрібно взяти верхню частину однією рукою й потягнути за нижню частину іншою рукою.



УВАГА Використовуйте наконечники для запобігання пошкоджень.

5. Технічне обслуговування і догляд



УВАГА Перевіряйте справність палиці перед кожним використанням, якщо палиця використовується не регулярно, то оглядайте її мінімум раз на шість місяців. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, не використовуйте виріб.

Догляд

Чистити палицю необхідно тільки сухою та м'якою ганчіркою.

Зберігання

Палицю потрібно зберігати у сухому місці.



6. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:
Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____