



## Палиця складна з пластмасовою ручкою Т-форми

**OSD-YU831**

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.  
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕ

## ЗМІСТ

1. Вступ.....	3
2. Заходи безпеки.....	3
3. Технічні характеристики.....	3
4. Використання .....	4
5. Технічне обслуговування і догляд.....	4
6. Умови гарантії .....	5

## 1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь-ласка уважно ознайомтесь з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання виробу.



- УВАГА**
- Не використовуйте палицю не ознайомившись з інструкцією.**
  - Не використовуйте палицю у випадку її пошкодження.**
  - Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Палиця складна «OSD-YU831» – рекомендована для застосування літнім та слабким людям, а також людям з обмеженими функціональними можливостями нижніх кінцівок. Використовується для полегшення самостійного пересування інвалідів, літніх людей, хворих у реабілітаційний період після травм та операцій.

Палиці «OSD» розроблені для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

## 2. Заходи безпеки

1. Перед початком використання палиці або під час використання після тривалого зберігання **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що всі частини закріплені та міцно зафіксовані.
2. Регулярно **ПЕРЕВІРЯЙТЕ** загальний технічний стан палиці, адже усі елементи з часом зношуються. Особливо це стосується наконечника, тому стежте за його станом та вчасно **ЗАМІНЮЙТЕ**.
3. Якщо виявлено несправність, то **НЕ ПРОВОДЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
4. Будьте обачні на слизькій дорозі. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** палицю як інструмент для спуску або засіб для самозахисту.



- УВАГА**
- Не використовуйте ручку палиці в якості підставки для ніг або оперття для сидіння.**

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування палиці, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

## 3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-YU831
Тип:	для правої та лівої руки
Колір:	чорний

Матеріал:	алюміній
Матеріал руків'я:	пластик
Загальна висота, (см):	від 80 до 90
Діаметр, (см):	1,9
Максимальне навантаження, (кг):	100

## 4. Використання

### Налаштування висоти палиці

Для того, щоб налаштувати правильну довжину потрібно поставити палицю біля себе на відстані 20 см. Потім трохи вигнути лікті й у цьому стані вибрати зручну довжину.

### Регулювання висоти

Для того, щоб відрегулювати необхідну висоту палиці потрібно взяти верхню частину, натиснути на регулятор і розтягнути її.

### Складання

Щоб скласти модель OSD-YU831 потрібно взяти верхню частину однією рукою й потягнути за нижню частину іншою рукою.

УВАГА



**Використовуйте наконечники для запобігання пошкоджень.**

## 5. Технічне обслуговування і догляд

УВАГА



**Перевіряйте справність палиці перед кожним використанням, якщо палиця використовується не регулярно, то оглядайте її мінімум раз на шість місяців. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, не використовуйте виріб.**

### Догляд

Чистити палицю необхідно тільки сухою та м'якою ганчіркою.

### Зберігання

Палицю потрібно зберігати у сухому місці.



## 6. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
  - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:  
*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.**

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_