



Ходунки: OSD-BL5F

Інструкція

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Ходунки «OSD-BL5F» (далі за паспортом — виріб / ходунці) — рекомендовано для застосування у медичних закладах та вдома.

Виріб розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.



Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будь-які характеристики, зазначені у цій Інструкції. Усі дані, зазначені в Інструкції, наведені для ознайомлення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ**
2. будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації. **ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** у випадку зносу або пошкодження.
3. **ЯКЩО ВИЯВЛЕНО** несправність, то **НЕ ПРОВОДЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
4. **ВЧАСНО** замінійте наконечники та колеса! **НЕ ЗАСТОСОВУЙТЕ** надмірних зусиль під час встановлення будь-яких деталей.
5. Використовуйте ходунці тільки у якості опори для рук під час пересування. **НІКОЛИ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** ходунці, як крісло колісне.
6. **БУДЬТЕ ОБАЧНІ** на нерівних поверхнях.
7. **НІКОЛИ** не сидіть на ходунцях.
8. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб на сходах та ескалаторах.
9. **МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ** на виріб — 159 кг. **НІКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
10. **У ВИПАДКУ** використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметр	Значення
Різновид:	на колесах
Конструкція:	складана; розбірна
Матеріал рами:	сталь
Матеріал руків'я:	гума
Ширина, (см):	55,8

Висота, (см):	81,3 - 99
Розмір коліс, (дюйми):	5
Максимальне навантаження, (кг):	159

ОСОБЛИВОСТІ


- Міцна конструкція зі сталі. Зручні нековзкі накладки на ручках.
- Працюють у «фіксованому» режимі.
- Регулюється за висотою залежно від особливостей людини.
- П'ятидюймові колеса на передніх ніжках допомагають без зусиль пересувати ходунці уперед, а гумові наконечники на задніх ніжках запобігають ковзанню.
- Ходунці складаються, що зручно при зберіганні та транспортуванні.
- **Доступні додаткові аксесуари — опора під лікоть та піднос.** Вони не входять до стандартної комплектації, їх можна придбати окремо.

ВИКОРИСТАННЯ

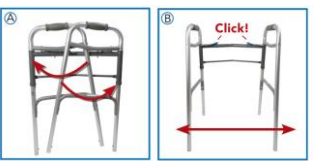

рами до центру. Щоб скласти ходунці натисніть центральну кнопку й поверніть бічну частину (рис. G, H).

2. Установіть бажану для користувача висоту. Перевірте «ходові якості».

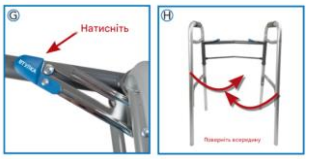

на ніжці, висота буде зафіксована. Переконайтеся у тому, що всі ніжки мають однакову висоту, а всі кнопки потрапили у відповідні отвори.



ФІКСОВАНА
КОНСТРУКЦІЯ

рис.3

до висуненої уперед частини ходунців, далі — другу ногу. Для переміщення

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь, відповідно до режимів застосування, затверджених в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкодженнь або розривів одного або декількох деталей, **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених в Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонт виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____ Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «OSD-BL5F» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

Виробник: BLISS HEALTH PRODUCTS CO.,LTD / БЛІСС ХЕЛС ПРОДАКТС КО., ЛТД No.3 Zehe Street, Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, 528415, People's Republic of China / №3, Зех Стріт, Тоншин Іст Роад, Юмін Ком'юніті, Сяолань Таун, Чжуншань Сіті, Гуандонг Провінс, 528415, Китайська Народна Республіка.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ "ОСД Східна Європа". Адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2 ; Тел.: +38 (044) 232 44 51, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: № 2 від 27.05.2026.

Термін придатності виробу: див. на маркованні.

Гарантійний термін на виріб «OSD-BL5F»: 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених в Інструкції.

