



Ходунки: OSD-CA875

Інструкція

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.
Ходунки «OSD-CA875» з двома колесами (далі за паспортом — виріб / ходунці) — допоміжний пристрій для людей з обмеженою мобільністю та людей похилого віку, який забезпечує додаткову опору, підвищує стійкість і безпеку під час ходьби.



Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будь-які характеристики, зазначені у цій Інструкції. Усі дані, зазначені в Інструкції, наведені для ознайомлення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** технічного втручання або модернізації.
- ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що всі елементи надійно закріплені.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб у випадку зносу або пошкодження. **ЯКЩО ВІЯВЛЕНО** несправність, **НЕ ПРОВІДЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
- Користувачам з обмеженою мобільністю може знадобитися допомога третьої особи з відповідними навичками.
- ВЧАСНО** замініуйте наконечники та колеса! **НЕ ЗАСТОСОВУЙТЕ** надмірних зусиль під час встановлення деталей.
- Використовуйте ходунці тільки у якості опори для рук під час пересування. **НІКОЛИ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** їх, як крісло колісне та **НЕ ВІШАЙТЕ** на них жодних предметів.
- Ходунки **ПРИЗНАЧЕНІ** для використання на рівних поверхнях з ухилом менше ніж 5%. **БУДЬТЕ ОБАЧНІ** на нерівних поверхнях.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб на сходах, ескалаторах, слизьких поверхнях.
- МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ** на виріб — 100 кг. **НІКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
- Якщо виробом користуються різні пацієнти, РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ регулярно мити та дезінфікувати його для запобігання поширенню інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Різновид:	на колесах
Конструкція:	складана
Матеріал рами:	алюміній
Матеріал руків'я:	пластик
Ширина, (см):	62
Ширина у складеному вигляді, (см):	10
Висота, (см):	74 - 90


Ширина сидіння, (см):	51
Розмір коліс, (дюйми):	3
Вага, (кг):	2,4
Максимальне навантаження, (кг):	100

ОСОБЛИВОСТІ

- Ходунки складаються з передньої та задньої опорних рам, ручки для штовхання, сидіння, механізму складання, підніжки та коліс.
- Легка й міцна алюмінієва конструкція з порошковим покриттям. Нековзкі накладки на ручках. М'яке сидіння з деревини, ПВХ та піни.
- Висота регулюється відповідно до зросту користувача.
- 8 рівнів регулювання висоти для користувачів зростом від 150 до 185 см.
- Ходунки легко складаються для зберігання та транспортування.
- Передні 3-дюймові колеса полегшують пересування, а гумові наконечники на задніх ніжках запобігають ковзанню.

ВИКОРИСТАННЯ

Розкладання

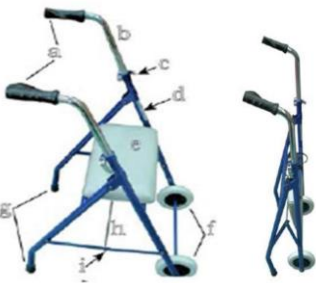

- Встановіть сидіння на розкладену раму.
- Щоб скласти, підніміть сидіння, потім потягніть за ремінець, що з'єднує поперечні перекладини з рамою, доки конструкція повністю не складеться. Після цього опустіть сидіння.

Регулювання висоти

Регулювання висоти ходунців відбувається за допомогою кнопок на кожній ніжці. Установіть потрібну висоту ніжок. Як тільки кнопка потрапить у потрібний отвір на ніжці, висота буде зафіксована. Переконайтеся у тому, що всі ніжки мають однакову висоту, а всі кнопки потрапили у відповідні отвори.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь, відповідно до режимів застосування, затверджених в установленому порядку. Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та м'яких засобів. Регулярно протирайте ходунки та підтримуйте всі їхні елементи в чистоті. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання. Зберігайте ходунки в сухому, добре провітрюваному місці.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкодження або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИ-

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених в Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонт виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____ Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «OSD-CA875» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

Виробник: FOSHAN SHUNKANGDA MEDICAL TECH CO., LTD Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District, 528251 Foshan city, Guangdong, P.R. China / ФОШАНЬ ШУНКАНГДА МЕДИКАЛ ТЕХ КО., ЛТД Пінгнан Індастріал Ерія, Гученг Нанхай Дістрікт, 528251 Фошань сیتی, Гуандонг, П.Р. Китайа.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ "ОСД Східна Європа". Адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2 ; Тел.: +38 (044) 232 44 51, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: № 2 від 05.08.2026.
Термін придатності виробу: див. на маркуванні.

Гарантійний термін на виріб «OSD-CA875»: 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених в Ін-струкції.

