



Опорна рама

OSD-KL9101

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.

ЗМІСТ

1.	Вступ.....	3
2.	Заходи безпеки	3
3.	Технічні характеристики.....	4
4.	Монтаж	4
5.	Технічне обслуговування і догляд.....	6
6.	Відомості про сертифікацію.....	6
7.	Умови гарантії	7

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією та дотримуйтесь її під час використання виробу.



Не використовуйте опорну раму, не ознайомившись з Інструкцією.

Не використовуйте опорну раму у випадку її пошкодження.

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Опорна рама «OSD-KL9101» (далі за паспортом — виріб/пристрій/рама) — пристрій, який підтримує і полегшує пересування людей з обмеженими фізичними можливостями або проблемами опорно-рухового апарату. Рама забезпечує стабільність під час руху, зменшуючи навантаження на ноги і спину, перенаправляючи навантаження на передпліччя. Опорна рама використовується як знімний елемент разом із ходунцями. Вона легко регулюється та кріпиться до ваших ходунців. Виріб розроблений для максимальної зручності та безпеки користувача.

2. Заходи безпеки

1. Перед початком використання рами або після тривалого зберігання **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання.
2. Перед кожним використанням **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** раму у випадку зносу або пошкодження деталей.
3. **ПЕРЕД УСТАНОВКОЮ ОПОРНОЇ РАМИ** переконайтеся, що ходунці перебувають у зафіксованому відкритому положенні, щоб уникнути серйозних травм.
4. Ходунці **ПОВИННІ** стояти на рівні землі.
5. **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** встановлювати опорну раму з обох боків ходунців для кращої стійкості.
6. Усі чотири ноги ходунців **ПОВИННІ** торкатися підлоги, коли ви спираєтесь на раму.
7. Не нахиляйтеся занадто далеко вперед або вбік при використанні опорної рами, оскільки ходунці можуть вийти з рівноваги, ви можете отримати травму.
8. Якщо кріплення рами піддається впливу екстремальних температур, високої вологості та/або стає вологим, перед використанням переконайтеся, що рукоятки кріплення не крутяться та міцно зафіксовані, щоб запобігти пошкодженням та травмам.
9. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** раму разом з іншими аксесуарами для ходунців.

10. Якщо якісь компоненти пошкоджені або відсутні, негайно зверніться до постачальника.
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ замітники деталей. **НЕ ПРОВОДЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
11. **МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ** на виріб – 136 кг. **НІКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!



Неправильне встановлення виробу може призвести до травмування користувача або пошкодження пристрою.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування опорної рами, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-KL9101
Матеріал:	алюмінієвий сплав
Висота, (см):	106,9
Висота до трубки підлокітника, (см):	92,7
Висота до підлокітника, (см):	96,5
Діаметр опорної трубки, (мм):	22
Діаметр трубки підлокітника, (мм):	19
Довжина, (см):	46
Довжина підлокітника, (см):	20,8
Ширина, (см):	15,2
Ширина підлокітника, (см):	11,8
Максимальне навантаження, (кг):	136
Гарантія, (міс.):	12

4. Монтаж



Після БУДЬ-ЯКИХ регулювань, ремонту чи обслуговування та ПЕРЕД використанням переконайтеся, що всі компоненти кріплення надійно закріплені.

1. Розкладіть ходунці та надійно зафіксуйте їх у відкритому положенні.
2. Визначте, з якого боку буде використовуватися кріплення рами.
3. Прикріпіть затискачі до вертикальної стійки платформи і вільно прикріпіть ручку до опори для рук (див. мал. 1, мал. 2).
4. Вільно прикріпіть нижній затискач до нижньої горизонтальної поперечини ходунців.
5. Вільно прикріпіть верхній затискач рами до верхньої горизонтальної поперечини ходунців.
6. Відрегулюйте стійку платформи на потрібну висоту.

7. Обережно затягніть обидва затискачі, однаково відрегулювавши обидві сторони.
8. Відрегулюйте підлокітник та ручку для більшого комфорту і підтримки пацієнта.
9. Затягніть всі ручки регулювання, щоб забезпечити безпеку пацієнта.
10. Перевірте стійкість перед використанням, злегка натиснувши на платформу.
11. Перевірте «ходові якості» реабілітаційних ходунців.

Нижнє кріплення


1. Встановить затискачі опорної трубки кріплення рами на поперечини ходунців, як показано на малюнку 1.
2. Встановить ручки та фурнітуру, затягніть їх до упору. Повторіть з іншого боку.

Верхнє кріплення

1. Встановить трубку підлокітника під платформою рами, як показана на малюнку 2.
2. Вставте болти каретки, звичайні шайби та ручки. Затягніть їх до упору.
3. Щоб відрегулювати довжину трубки підлокітника, ослабте ручки регулювання довжини і посуньте трубку підлокітника всередину або назовні до потрібного положення.
4. Надійно затягніть ручки, щоб зафіксувати трубку підлокітника.



Мал. 1

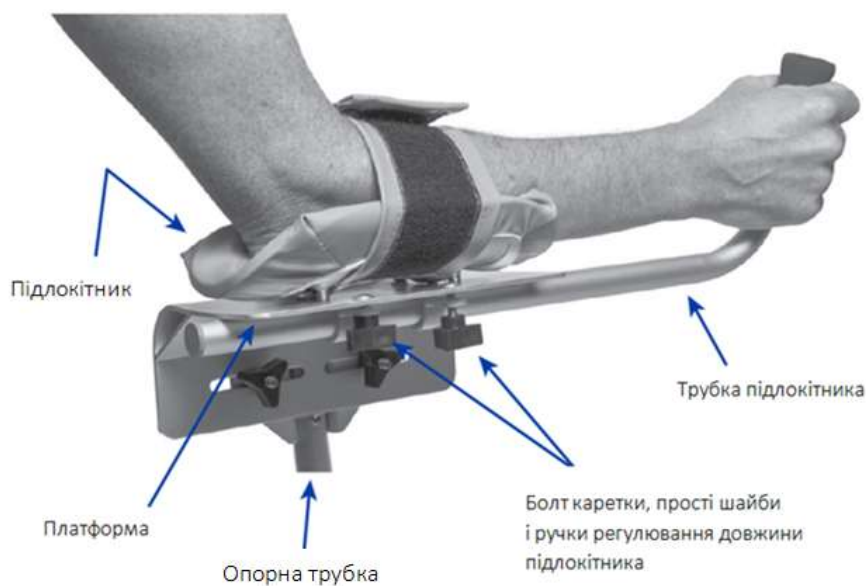

Мал. 2

5. Технічне обслуговування і догляд



Перевіряйте справність виробу перед кожним використанням.

У разі поломки або несправності, пошкодженень НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

1. Регулярно перевіряйте всі гвинти та елементи кріплення, щоб переконатися, що вони надійно закріплені.
2. Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.
3. Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну.
4. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати.
5. Використовуйте м'яке мило або миючий засіб, щоб очистити накладки для рук. Після обробки **ОБОВ'ЯЗКОВО** ретельно висушити їх.
6. Протирайте виріб сухою та м'якою ганчіркою після кожного використання.
7. Виріб потрібно зберігати у сухому місці.
8. У разі виникнення будь-яких негараздів, негайно зверніться до спеціаліста.



Максимальне навантаження – 136 кг. НІКОЛИ не перевищуйте допустимий ліміт ваги!

Ніколи не використовуйте несправний виріб, не намагайтеся ремонтувати його самостійно.

6. Відомості про сертифікацію

Виріб «OSD-KL9101» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.



Виробник: Bliss Health Products Co., Ltd , 96, Zhaoyi Rd., Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province , P.R.C/Блісс Хелс продуктс Ко., Лтд, Чжаої Рд, Донгшен Таун, Жонгшан Сіті, Гуангдонг Провінс, Китай

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа». Адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2; Тел.: +38 (044) 232 44 51, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: № 2 від 06.02.2025.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін на виріб «OSD-KL9101» – 12 місяців з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.

7. Умови гарантії



ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____