



Ходунки: OSD-Q101KD

Інструкція

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією. Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження. Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Ходунки «OSD-Q101KD» (далі за паспортом — виріб / ходунці) — рекомендовано для застосування у медичних закладах та вдома.

Виріб розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача. Відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.



Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будь-які характеристики, зазначені у цій Інструкції. Усі дані, зазначені в Інструкції, наведені для ознайомлення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** у випадку зносу або пошкодження.
- ЯКЩО ВИЯВЛЕНО** несправність, то **НЕ ПРОВОДЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
- ВЧАСНО** замінійте наконечники!
- БУДЬТЕ ОБАЧНІ** на нерівних поверхнях.
- НИКОЛИ** не сидіть на ходунцях.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб на сходах та ескалаторах.
- МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ** на виріб – 136 кг. **НИКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
- У ВИПАДКУ** використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Різновид:	універсальні
Конструкція:	складана; розбірна
Колір:	сірий
Матеріал рами:	алюміній

Матеріал руків'я:	гума
Ширина, (см):	54
Висота, (см):	від 73 до 91
Вага виробу, (кг):	3
Максимальне навантаження, (кг):	136
Гарантія, (міс.):	12

ВИКОРИСТАННЯ

Розкладання

- Розкладіть раму. Для того, щоб розкласти ходунці розверніть дві бічні частини, поки не почуєте клацання. Щоб скласти ходунці натисніть центральну кнопку й поверніть бічну частину.
- Установіть бажану для користувача висоту.
- Перевірте «ходові якості» ходунців.

Регулювання висоти

Регулювання висоти ходунців відбувається за допомогою кнопок на кожній ніжці. Установіть потрібну висоту ніжок. Як тільки кнопка потрапить у потрібний отвір на ніжці, висота буде зафіксована. Переконайтеся у тому, що всі ніжки мають однакову висоту, а всі кнопки потрапили у відповідні отвори.

Використання

Універсальні ходунці «OSD-Q101KD» можуть використовуватись у двох режимах: фіксований та крокуючий. Для зміни режиму необхідно перемістити фіксатор на рамі ходунців (див. Рис. 1).

Використання у фіксованому режимі (див. Рис. 2):

Перемістіть ходунці уперед на відстань, що дорівнює Вашому стандартному кроку. Потім, спираючись на них, перемістіть ногу до висуненої уперед частини ходунців, далі – другу ногу. Для переміщення повторіть зазначені вище рекомендації.

Використання у крокуючому режимі (див. Рис. 2):

Розташуйте ходунці перед собою. Перемістіть одну сторону ходунців на кілька сантиметрів уперед. Потім пересувайте ногу до висунутої уперед частини ходунців. Те ж саме повторіть з іншою частиною. Для переміщення уперед, повторіть вищезазначені рекомендації.

1. «Міжопорний режим»
2. «Фіксований режим»

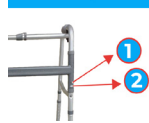


Рис. 1



УНІВЕРСАЛЬНА
КОНСТРУКЦІЯ

Рис. 2

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режими, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкодження або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених в Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонт виробу);
 - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
 - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____ Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «OSD-Q101KD» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

Виробник: Zhongshan Qunn Medical Equipment Co., Ltd. / Жонгшан Куїнн Медікал Еквіпмент Ко., Лтд.

3rd Booth No. 108 Zhaoyi Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong, The people's republic of China / 3 Бус №108 Чжаойї Родд, Донгшенг Таун, Жонгшан Сіті, Гуангдонг, Китайська народна республіка.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський, 100/2.

Номер редакції: № 4 від 04.01.2023.

Термін придатності виробу: див. на маркованні.

Гарантійний термін на виріб «OSD-Q101KD»: 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених в Інструкції.

