



Стіл для ходунків

OSD-TBL1

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтеся вносити зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Стіл для ходунків «OSD-TBL1» (далі за паспортом – виріб / стіл / піднос) призначений для транспортування їжі та речей з одного місця в інше. Рекомендований для застосування у медичних закладах та в домашніх умовах.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком використання виробу або після тривалого зберігання **ПЕРЕВІРТЕ** його **НА НАЯВНІСТЬ ТРИЩИН** і **УШКОДЖЕНЬ**. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан.

- 1. ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- 2. ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб у випадку його зносу або пошкодження.
- 3. ПЕРІОДИЧНО** перевіряйте стійкість виробу.
- 4. ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що всі частини ходунків, на які встановлюють виріб, закріплені та міцно зафіксовані.
- 5.** Перед використанням переконайтеся, що стіл для ходунків надійно встановлено згідно з інструкцією.
- 6. НИКОЛИ** не сидіть і не натискайте на столик для ходунків.
- 7. НИКОЛИ** не використовуйте столик для ходунків як засіб опори.
- 8. БУДЬТЕ ОСОБЛИВО ОБЕРЕЖНІ**, тримаючи гарячі напої та пересуваючись по нерівній підлозі або порогах.
- 9. КОРИСТУВАЧАМ** з обмеженими фізичними можливостями **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** звертатися за допомогою до асистента.
- 10. У РАЗІ** використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично та ретельно мити й дезінфікувати його, щоб уникнути інфекцій.
- 11. ПОВЕРХНЮ** столика **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** протирати вологою тканиною. Засоби для чищення повинні бути м'якими. Можна використовувати побутові очисні засоби.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.



Компанія ТМ «OSD» не несе відповідальності за будь-які пошкодження або травми, спричинені неправильним встановленням або використанням виробу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Значення |
|----------------------------------|----------|
| Модель: | OSD-TBL1 |
| Матеріал: | пластик |
| Колір: | сірий |
| Ширина, (см): | 58 |
| Внутрішня ширина, (см): | 42 |
| Глибина, (см): | 42,5 |
| Висота, (см): | 2,85 |
| Ширина подовжного прорізу, (см): | 5,7 |
| Діаметр підстаканника, (см): | 6,85 |

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

- Виготовлений з міцного пластику сірого кольору з гладкою поверхнею. Має 1 підстаканник.
- Забезпечує зручність, комфорт та безпеку користувача під час перенесення їжі чи інших предметів.
- Не порушує стійкість під час ходьби.
- Підходить для більшості моделей ходунків.
- Підняті краї вздовж столу допомагають запобігти розливанню рідини.
- Легкий та зручний для транспортування.

ПОРЯДОК РОБОТИ



Встановлення підноса може відрізнятись залежно від моделі ходунків. У деяких ходунків є ручки, які запобігають повному сповзанню підноса вниз.

Перед встановленням підноса переконайтеся, що ходунці повністю розкладені та зафіксовані у відкритому положенні.

Помістіть піднос на ходунці та міцно натисніть, поки він не ковзне по ручках і не стане рівно.

Щоб піднос був стійким, розміщуйте предмети завжди по центру.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь, відповідно до чинних нормативних документів.

Завжди тримайте виріб у чистоті для тривалого використання. Очищайте його водою та миючими засобами, не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Після кожного використання протірайте виріб сухою ганчіркою.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням. У разі поломки, несправності, пошкодження або розривів НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонт виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія поширюється на виробничі та матеріальні дефекти, вона не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтю 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «OSD-TBL1» відповідає технічним вимогам і визнано придатним для експлуатації.

Виробник: BLISS HEALTH PRODUCTS CO., LTD / БЛІСС ХЕЛС ПРОДАКТС КО., ЛТД. No.3 Zehe Street, Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, 528415, People's Republic of China / №3, Зех Стріт, Тоншин Іст Роад, Юмін Ком'юніті, Сяолань Таун, Чжуншань Сіті, Гуандонг Провінс, 528415, Китайська Народна Республіка.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ "ОСД Східна Європа". Адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2; Тел.: +38 (044) 232-44-51, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: № 3 від 06.01.2026.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Термін придатності виробу: див. на маркуванні.

Гарантійний термін на виріб «OSD-TBL1» – 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.